


إذا كنت قد حصلت على علاج بواسطة: نوفلايزر® Novolizer

نوفلايزر® Novolizer – سهل الاستخدام وبالطريقة الصحيحة


قم بالضغط على زر الجرعات لإخراج جرعة. عندما يتحول لون الشاشة إلى اللون الأخضر، فإن الجرعة تكون قد أخرجت بشكل صحيح. وجهاز الاستنشاق على استعداد للاستخدام. بعد إجراء عملية الاستنشاق بشكل صحيح، يتغير المؤشر في الشاشة مرة أخرى من اللون الأخضر إلى اللون الأحمر. إذا لم يتغير اللون في مؤشر الشاشة فإنه يجب تكرار عملية الاستنشاق.



3. قم بالاستنشاق

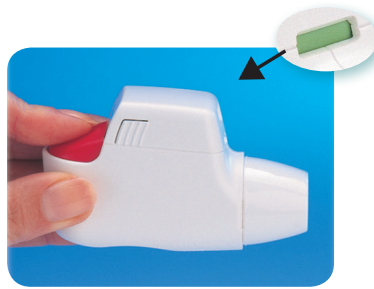

2. قم بالضغط على زر الموزع الأوتوماتيكي

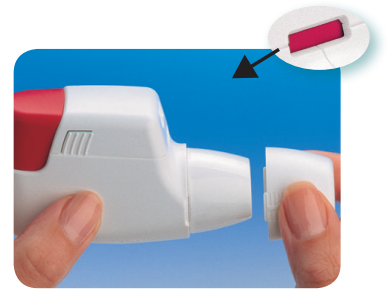

1. قم بخلع الغطاء الصحافة

نوفلايزر® Novolizer – أنت تعلم عندما يكون الأمر صحيحا

نقر
يؤكد الاستنشاق الصحيح



اللون الأحمر
يؤكد الاستنشاق الصحيح




النكهة
يؤكد الاستنشاق الصحيح



انقر نقرا مزدوجا
يؤكد إخراج الجرعة السليمة



اللون الأخضر
جهاز الاستنشاق جاهز
للاستخدام

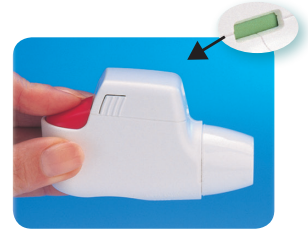

قم بمسح ضوئي للرمز - QR بواسطة الهاتف النقال لمشاهدة أشرطة الفيديو التعليمية على الموقع: www.novolizer.se



يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني:

- www.novolizer.se
- www.astmalinjen.se
- www.kolguiden.se

نوفلايزر® Novolizer – عداد الجرعات واضح وصحيحا


لدى نوفلايزر عداد الجرعات الذي يميز عدد كل 10 جرعات. عندما يظهر رقم 0 في العداد، فهذا يعني أنه قد حان الوقت لتغيير الشريط.




Novolizer®

جهاز الاستنشاق الذي يحدث فرقا


إعادة تعبئة جهاز الاستنشاق بشريط جديد

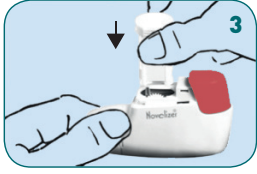

3. قم بوضع الشريط في جهاز الاستنشاق مع وضع عداد الجرعات في مقدمة الواجهة.

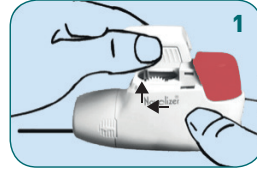

1. اضغط برفق على السطح المضلع الموجود على جانبي الغطاء معاً، أزح الغطاء إلى الأمام، وقم برفعه من مكانه.

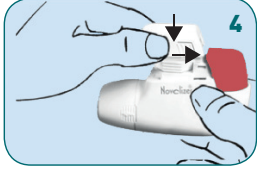

4. قم باستبدال الغطاء وذلك من على المسارات الجانبية من الأعلى، وقم بدفعه إلى أسفل حتى تسمع نقرة.



2. قم بإزالة رقائق الألومنيوم الواقية من حامل الشريط، وقم بإخراج الشريط.

نوفوليزر® Novolizer – جهاز الاستنشاق الذي يحدث فرقا

يستخدم نوفوليزر في علاج مرض الربو وداء انسداد الشعب الهوائية الرئوية المزمن (داء انسداد الشعب الهوائية الرئوية المزمن). يتوفر جهاز الاستنشاق في سلسلة:



Ventilastin® Novolizer® (salbutamol)
فنتيلاستين نوفوليزر (سالبوتامول)
موسعات الشعب الهوائية ذات المدى القصير
100 ميكروغرام و 200 جرعة



Formatrix® Novolizer® (formoterol)
فورماتريس نوفوليزر (فورموتيرول)
موسعات الشعب الهوائية ذات المدى الطويل
6 ميكروغرام و 60 جرعة • 12 ميكروغرام و 60 جرعة



Novopulmon® Novolizer® (budesonid)
نوفوبولموم نوفوليزر (بوديزونيد)
استنشاق الستيرويد المنشط
200 ميكروغرام و 200 جرعة • 400 ميكروغرام و 200 جرعة

يكفي جهاز نوفوليزر 2000 عملية اشتنشاق، أو الاستعمال لمدة سنة. وهذا يعني أنه يمكنك إعادة تعبئة جهاز الاستنشاق بنفسك، مما يقلل من التكاليف والآثار البيئية.

خطة العلاج الخاصة بي

فنتيلاستين نوفوليزر® Ventilastin® Novolizer® – موسعات الشعب الهوائية ذات المدى القصير

القدرة: 100 ميكروغرام

عدد الاستنشاقات / في اليوم: تاريخ البدء:

نوفوبولموم نوفوليزر® Novopulmon® Novolizer® – استنشاق الستيرويد المنشط

القدرة: 200 ميكروغرام 400 ميكروغرام

عدد الاستنشاقات / في اليوم: تاريخ البدء:

فورماتريس نوفوليزر® Formatrix® Novolizer® – موسعات الشعب الهوائية ذات المدى الطويل

القدرة: 6 ميكروغرام 12 ميكروغرام

عدد الاستنشاقات / في اليوم: تاريخ البدء:

Novolizer®

جهاز الاستنشاق الذي يحدث فرقا