


Za vas koji primete terapiju Novolizer® -om

Novolizer® – jednostavan za pravilno korišćenje

Pritisnite dugme za doziranje da biste pripravili dozu. Kada je displej promenio boju u zelenu, to znači da je doza ispravno pripravljena. Inhalator je spreman za korišćenje. Kada je inhalacija izvedena na pravilan način, displej menja boju od zelene ponovo u crvenu. Ukoliko se boja ne promeni, inhalacija se mora ponoviti.

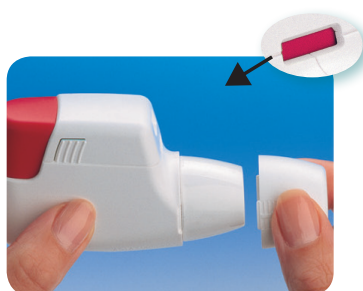

1. Skinite poklopac



2. Pritisnite dugme za doziranje



3. Inhalirajte

Novolizer® – znate kada je pravilno izvedeno



Dupli klik
Potvrđuje da je doza spremna



Zeleno
Inhalator je spreman za korišćenje



Klik
Potvrđuje pravilno izvedenu inhalaciju



Crveno
Potvrđuje pravilno izvedenu inhalaciju



Ukus
Potvrđuje pravilno izvedenu inhalaciju



Skanirajte QR-šifru pomoću mobilnog telefona da biste pogledali instrukcione filmove na www.novolizer.se

Novolizer® – jasno brojilo

Novolizer® ima brojilo koje označava svaku 10:u dozu. Kada brojilo pokazuje nulu, vreme je da se kasetna promeni.



Molimo vas da posetite i naše web-stranice:


- www.novolizer.se
- www.astmalinjen.se
- www.kolguiden.se

Novolizer®

Inhalator koji se razlikuje od drugih

Dopunite inhalator novom kasetom


1. Lagano stisnite rebraste površine na stranama poklopca, povucite poklopac napred i skinite ga.

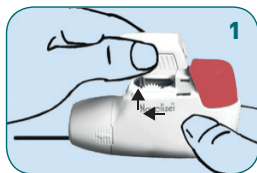


2. Skinite zaštitnu aluminijsku foliju sa posude kasete i izvadite kasetu.



3. Stavite kasetu u inhalator sa brojiлом okrenutim prema napred.

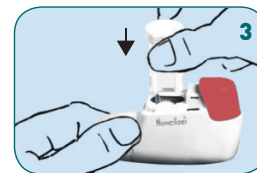

4. Stavite poklopac u brazde sa strane i pritisnite na dole prema dugmetu dok se ne čuje klik.

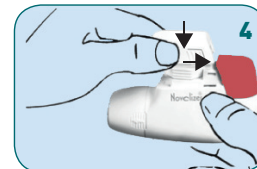

Novolizer® – inhalator koji se razlikuje od drugih

Novolizer® se koristi u terapiji astme i KOL-a (hronične opstruktivne bolesti pluća).

Novolizer® postoji u seriji:



Novopulmon® Novolizer® (budesonid)
Inhalacioni steroid

200 µg, 200 doza • 400 µg, 200 doza



Formatris® Novolizer® (formoterol)
Dugotrajni bronhodilatator

6 µg, 60 doza • 12 µg, 60 doza



Ventilastin® Novolizer® (salbutamol)
Kratkotrajni bronhodilatator

100 µg, 200 doza

Novolizer® traje za 2000 inhalacija ili godinu dana. To znači da sami možete puniti vaš inhalator kasetama, što smanjuje troškove i pozitivno utiče na životnu sredinu.

Moj plan terapije

Novopulmon® Novolizer® – Inhalacioni steroid

Jačina: 200 µg 400 µg

Broj inhalacija na dan: Datum početka:

Ventilastin® Novolizer® – Kratkotrajni bronhodilatator

Jačina: 100 µg

Broj inhalacija na dan: Datum početka:

Formatris® Novolizer® – Dugotrajni bronhodilatator

Jačina: 6 µg 12 µg

Broj inhalacija na dan: Datum početka:

Novolizer®

Inhalator koji se razlikuje od drugih